

# Zo houd ik de accu van Scoozy in topconditie

Scoozy B (Serienummer 20-100) maakt gebruik van een Lithium Ion batterij. Dit document legt uit hoe je de batterij in goede conditie houdt. De accu komt in een diep ontladen toestand wanneer de accu niet op tijd opgeladen wordt. De accu gaat hierdoor kapot en dit valt niet onder de garantie. Volg de instructies goed om diep ontladen te voorkomen. Met deze 8 stappen houd je jouw accu in topconditie.

## 1 Slaapmodus na 48 uur

Scoozy schakelt met de nieuwste softwareversie na 48 uur automatisch volledig uit en kan voor een langere tijd (>2 weken) gesteld worden zonder dat er schade aan de accu ontstaat. Zorg ervoor dat Scoozy:


- Niet aan de lader staat.
- Niet op de Manual Override (vrijloop) staat.
- Uitgeschakeld staat (knop op de displayunit staat uit).
- Kijk bij stap 6 om te zien of jouw Scoozy 48 uur software heeft. Doorloop eerst stappen 2 t/m 5.

## 2 Laad Scoozy 1x per maand op



- Scoozy heeft, zoals elke scootmobiel, een stand-by verbruik of sluimerverbruik. Dit betekent dat als je Scoozy wegzet en niet gebruikt, zij toch stroom verbruikt en de accu niet volledig volgeladen blijft.
- Daarom raden we aan om de accu elke maand op te laden.
- Volg de volgende stappen voor het juist opladen van Scoozy.

## 3 Steek altijd eerst de stekker in Scoozy, daarna in het stopcontact

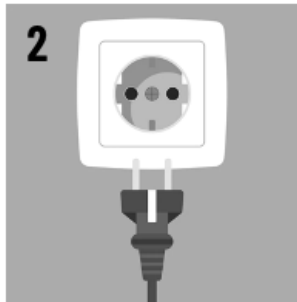

## 4 Kijk alleen naar de laadindicatie op het display



- De oplader geeft met het 100% groene lampje **niet** aan dat de accu 100% geladen is, maar dat de laadcyclus voltooid is.
- De oplader gaat 1 keer 1 laadcyclus af en is dus **geen** druppellader.
- Lees op het display van Scoozy op basis van de actieradius af of de batterij vol is.
- Zie handleiding pagina 33: oplaadtijd.

## 5 Verwijder de lader als de batterij vol is



- Laat de lader nooit langer dan 12 uur aangesloten. De combinatie van lader, accu en Scoozy voorziet **niet** in druppelladen.
- **TIP:** Om de acculader veilig aangesloten te kunnen houden adviseren wij een tijdschakelaar tussen de acculader en het stopcontact te plaatsen.
- Zie handleiding pagina 32: opladen accu.

## 6 Check of slaapmodus na 48u actief wordt



- Laat Scoozy >48 ongebruikt, zorg dat Scoozy volledig uitgeschakeld is en de lader niet is aangesloten.
- Check na 48u of Scoozy aan gaat door de knop op de displayunit in te drukken.
- Gaat Scoozy niet aan? Dan heeft Scoozy de nieuwste software. Ga naar stap 7.
- Gaat Scoozy aan? Dan heeft Scoozy geen slaapmodus. Ga naar stap 8.
- Laad de accu van Scoozy altijd 100% op alvorens Scoozy voor een langere tijd te stallen.
- Zie handleiding pagina 29: winter- of langdurige stalling, >3 maanden.

## 7 Ontwaak Scoozy uit slaapmodus

1. Druk de Manual Override Button (vrijloop knop) achterop Scoozy in. De knop blijft ingedrukt om aan te geven dat de vrijloop ingeschakeld is.



2. Wacht 5 seconden om te luisteren of de remmen los klikken. Kan Scoozy weer rollen? Zet dan de vrijloop knop weer uit.
3. Zet Scoozy aan met de aan/uit schakelaar op het bedieningspaneel.



## 8 Wat te doen als mijn Scoozy na 48u niet in slaapmodus gaat


- Vraag een software-update aan door een e-mail te sturen naar [service@scoozy.nl](mailto:service@scoozy.nl).
- Laad Scoozy 1x per week op.
- Om de acculader veilig aangesloten te kunnen houden adviseren wij een tijdschakelaar tussen de acculader en het stopcontact te plaatsen. Op deze manier boots je een druppellaadefect na.



- Bij lang stallen zonder gebruik is het van het grootste belang het elektrisch systeem volledig uit te schakelen door de hoofdkabel (High-Power-Kabel) los te maken om diepteontlading te voorkomen.
- Zie handleiding pagina 29: winter- of langdurige stalling, >3 maanden.



1. Verwijder het zekering klepje door de kruikopschroef (onder het rubber) los te draaien.

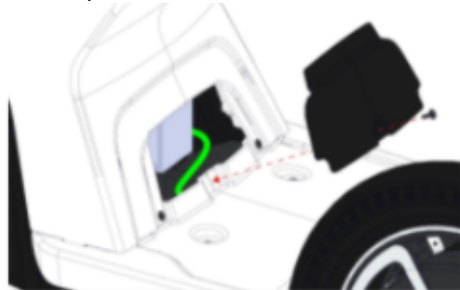

2. Maak de grote mox connector van de rood/witte kabel links achterop de DCU los (Druk het palletje goed in, anders trek je de kabel kapot!)



3. Neem Scoozy weer in gebruik door de rood/witte kabel aan te sluiten en volg daarna stap 3.